

PRUEBA RÁPIDA SARS-COV-2 AG

MARCA: VivaDiag



DES CRIP CIÓN

La prueba rápida SARS-CoV-2 Ag es un dispositivo **utilizado para la detección rápida y cualitativa del antígeno reactivo para el COVID-19.**

Utiliza muestras obtenidas por hisopado nasal u orofaríngeo y debe ser utilizado en casos sospechosos durante los 5 días posteriores al inicio de los síntomas.





COMPOSICIÓN

Cada kit de diagnóstico contiene dispositivos de prueba, tubos con solución reactiva sellados al vacío, tapa de sellado para tubos de extracción, soporte para tubos, hisopos estériles y manual de uso.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Guardar el kit de prueba en un lugar fresco y seco entre 2-30 °C. Manténgase alejado de la luz. La exposición a temperatura y/o humedad fuera de las condiciones especificadas puede causar resultados inexactos.

FUNCIONAMIENTO


MANEJO

MODO DE USO




PASO 1

Realizar el hisopado en nariz o garganta durante 10 segundos y unir el hisopo en la fórmula reactiva. Girar 5 veces.

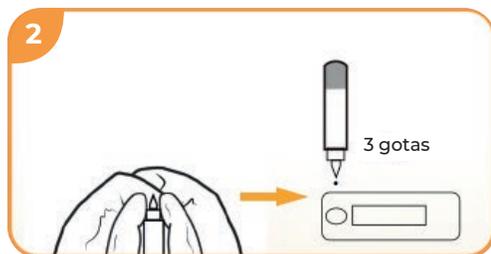

PASO 2

Retirar el hisopo y tapar el tubo con el tapón gotero. Colocar 3 gotas de reactivo en la zona indicada de la prueba.

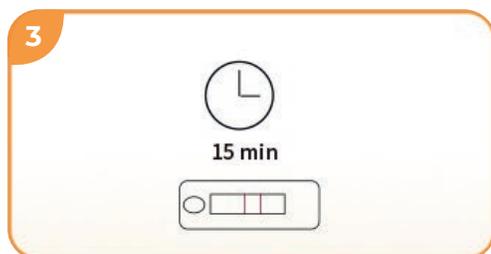

PASO 3

Esperar 15 min para saber el resultado.



Los resultados de la prueba del antígeno del SARS-CoV-2 no deben usarse como la única base para diagnosticar o excluir la infección por el SARS-CoV-2 o para informar el estado de la infección.

- No intercambie ni mezcle la solución de extracción de diferentes lotes.
- Manipule la solución de extracción con precaución, no entre en contacto con los ojos o la piel. Si se derrama sobre los ojos o la piel, lávese bien con abundante agua.
- Siga las normativas locales para el desechos de los materiales usados.



GARANTIA

Contamos con **garantías oficiales** de 6 meses que incluyen los siguientes servicios:

- + Asesoramiento para el uso.
- + Soporte técnico especializado.
- + Respuesta inmediata en caso de mal funcionamiento.



MD

FICHA TÉCNICA

EL SERVICIO INCLUYE

ASESORAMIENTO PARA SU USO

Vía telefónica o mediante video tutoriales.

GARANTÍA

6 meses.

SOMOS UNA EMPRESA PERUANA

que busca importar y brindar la mejor tecnología para el cuidado de la salud. Por ello disponemos de un alto nivel de compromiso para con el servicio de post-venta y emergencias de cualquiera de nuestros dispositivos.

INCLUYE

Dispositivos de prueba.

Tubos de reactivo.

Tapones con gotero.

Soporte para tubos.


Hisopos estériles.

Instrucciones de uso.



CERTIFICADO POR:



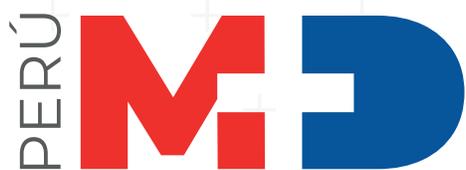

MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ ventas@mdperu.com

☎ +51 936 276 826

🌐 mdperu.com

☎ +51 1 4073376

📍 Av. El Ejército 1180. Edificio Time
Ofic. 1309 - Magdalena - Lima