



GERMI RIO PLUS

DESINFECTANTE

Marca: Rioquímica

PERÚ **M.D**

DES CRIP CIÓN

Germi Rio Plus es un desinfectante para distintas **superficies y artículos no críticos**, su fórmula exclusiva permite que se produzca la limpieza y desinfección en un mismo proceso. Se compone por una mezcla de cloruro de didecildimetilamonio, biguanida y un coadyuvante, que garantizan eficacia en unos pocos minutos.

Marca: **Rioquímica**
Procedencia: **Brasil**



AVALADO POR





EFECTO RESIDUAL

Acción extendida por 12 días desde el momento de la desinfección.



APLICACIONES

Para su uso en superficies, diluir el producto al 0,4% (4mL de desinfectante por cada 1L de agua) dejando actuar durante 1 min. Y para artículos no críticos, que entran en contacto con la piel del paciente, sumergir en su concentración máxima durante 5 min, enjuagar y secar antes de su uso.



LUGARES DE USO

Ideal para uso en hospitales, especialmente en áreas críticas con mayor probabilidad de contraer infección hospitalaria, residencias de ancianos, ambulatorios, consultorios dentales, clínicas y puestos de salud. Se puede aplicar en pisos, paredes, muebles y/o artículos no críticos.

FUNCION- NAMIENTO

COMPOSICIÓN:

Cloruro de Didecildimetilamonio, Clorhidrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB), Coadyuvante, Secuestrante, Conservante y Agua.

MATERIALES:

Compatible con acrílicos, esmaltes, pinturas, revestimientos, acero inoxidable, metal, porcelanato, polietileno, polipropileno, losetas, linóleo, pisos, PVC, vinilo, látex, monitores, pantallas LCD, bombas de infusión, incubadoras, transductores, etc. Tiene eficacia comprobada en presencia de suciedad (materia orgánica).

PRINCIPIO ACTIVO:

Surfactante Catiónico - 19,7% p/p, Clorhidrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB) - 0,8% p/p.


EFICACIA COMPROBADA:

Staphylococcus aureus, Salmonella cholerae-suis, Pseudomonas aeruginosa y H1N1/Influenza.



PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavar inmediatamente las partes afectadas con abundante agua durante 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de inhalación o aspiración, lleve al paciente al aire libre y solicite asistencia médica.

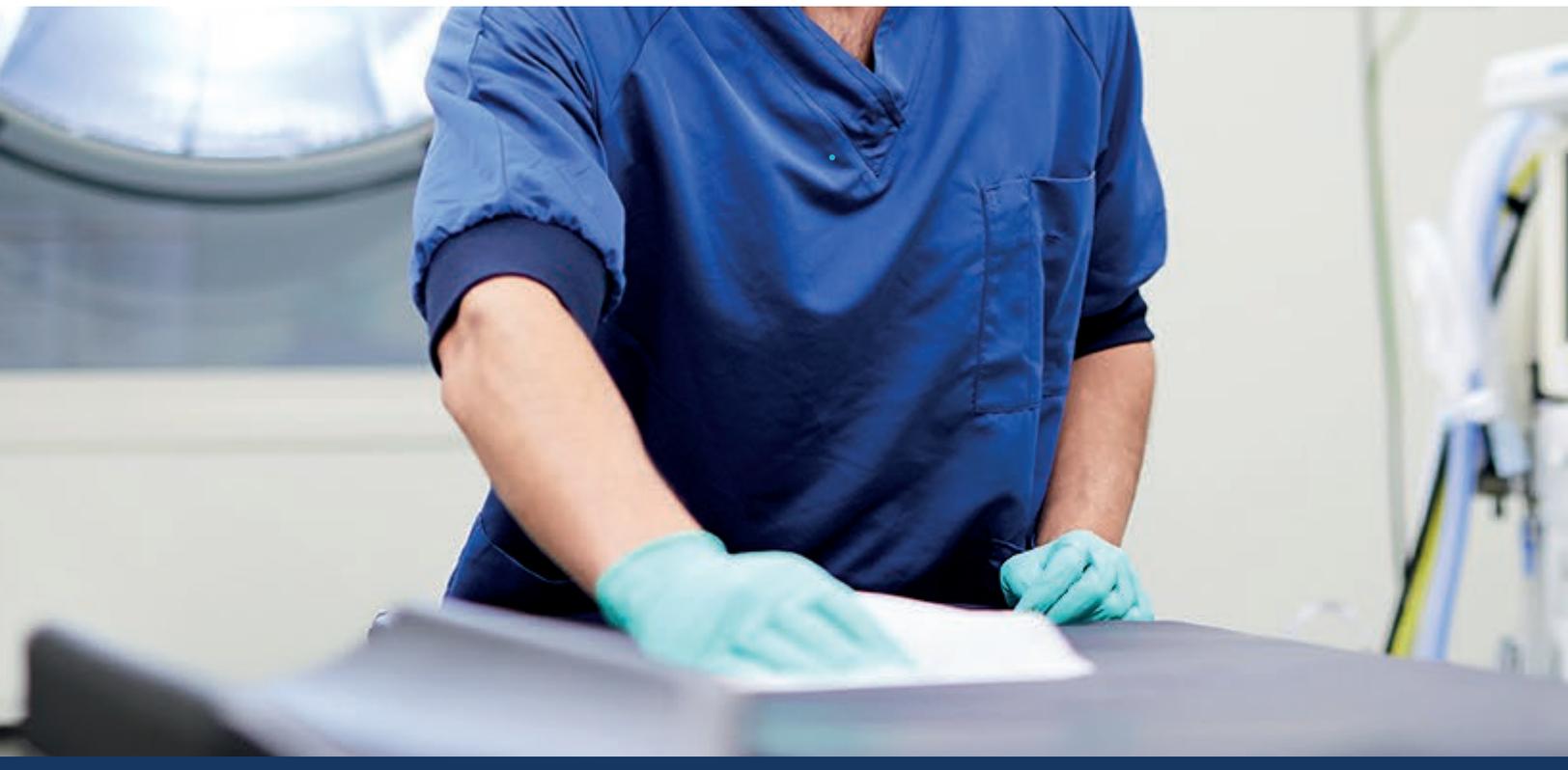

FUNCIO- NAMIENTO



RECOMENDACIONES

- El proceso de limpieza y desinfección debe realizarse con la frecuencia necesaria o de acuerdo con los protocolos existentes.
- Luego de su desinfección, se recomienda utilizar el dispositivo lo antes posible.
- Nunca aplicar el producto directamente sobre las superficies electrónicas. Primero aplicar el producto sobre el paño y después aplicar sobre la superficie.



PRECAUCIONES

- No es apto para uso domiciliario.
- No aplicar sobre personas, alimentos y animales.
- No mezclar con otros productos.
- Mantener el frasco protegido del sol y del calor.
- Utilizar equipo de protección personal adecuado como guantes, mascarillas, gafas y delantal para su aplicación.
- Almacenar en un lugar fresco.



GARANTIA

Contamos con **garantías oficiales** de 6 meses.
que incluyen los siguientes servicios:

- + Asesoramiento para el uso.
- + Soporte técnico especializado.
- + Respuesta inmediata en caso de mal funcionamiento.



MD

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EFICACIA COMPROBADA

Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa y H1N1/Influenza.

COMPOSICIÓN:

Cloruro de Didecildimetilamonio, Clorhidrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB), Coadyuvante, Secuestrante, Conservante y Agua.

PRINCIPIO ACTIVO:

Surfactante Catiónico - 19,7% p/p,
Clorhidrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB) - 0,8% p/p.

EL SERVICIO INCLUYE

SERVICIO TÉCNICO

24 horas / 365 días

CAPACITACIONES PRESENCIALES U ONLINE

A acordar con el profesional.

GARANTÍA


6 meses

SOMOS UNA EMPRESA PERUANA

que busca importar y brindar la mejor tecnología a nuestras clínicas, hospitales y profesionales. Por ello disponemos de un alto nivel de compromiso para con el servicio de post-venta y emergencias de cualquiera de nuestros dispositivos.

AVALADO POR



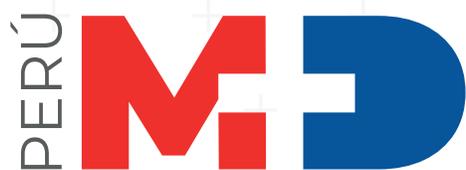

MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ ventas@mdperu.com

☎ +51 936 276 826

🌐 mdperu.com

☎ +51 1 4073376

📍 Av. El Ejército 1180. Edificio Time
Ofic. 1309 - Magdalena - Lima