



RIOZYME IV E NEUTRAL DETERGENTE ENZIMÁTICO

Marca: Rioquímica

PERÚ **M.D**

DES CRIP ÇÃO

RIOZYME IV e NEUTRAL es un **detergente enzimático** que posee **4 enzimas** que actúan para reducir la materia orgánica de los artículos en 5 minutos. Su exclusiva fórmula contiene tensioactivos que, asociados a enzimas, dan como resultado una mayor eficacia. Con poder desengrasante, ideal para equipamientos en general, instrumentos médico-hospitalarios, odontológicos y laboratorios, contiene acción bacteriostática y proteasa al 13.9%.

Marca: **Rioquímica**
Procedencia: **Brasil**



AVALADO POR



4 ENZIMAS

Su exclusiva fórmula con Amilasa, Carbohidrasa, Lipasa y Proteasa al 13.9% ayudar a generar una mayor eficacia en la limpieza y desinfección de superficies y dispositivos.



3 EN UNO

Utilícelo para la **desinfección, eliminación y limpieza** de la materia orgánica en endoscopios, fibroscopios y material canulado, en instrumental médico, odontológico y de laboratorios.



COMPATIBLE CON SUPERFICIES

Gracias a su pH neutro, no daña las superficies y es altamente compatible con desinfectantes que no tengan agentes oxidantes o yodo, es decir, desinfectantes con PH Neutro.

FUNCION- NAMIENTO

APLICACIÓN **EN DISPOSITIVOS**

Para la limpieza manual o automatizada, diluir RIOZYME IV y NEUTRO en la proporción de 1 mL del producto por cada 1 litro de agua y colocarlo en una batea. Sumergir el dispositivo dejándolo actuar por 5 minutos. Luego enjuague con abundante agua.

La temperatura del agua para que el producto sea más efectivo debe estar entre 30°C y 40°C). Para limpieza a temperatura ambiente el tiempo de inmersión del material con el producto debe ser validado de acuerdo al protocolo de limpieza interna del hospital.




PRECAUCIÓN

- No es apto para uso domiciliario.
- Mantener alejado al alcance de los niños.
- Evite la inhalación o aspiración, el contacto con los ojos o la piel.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua.



PRECAUCIONES

Utilizar el producto con la indumentaria de seguridad adecuada.

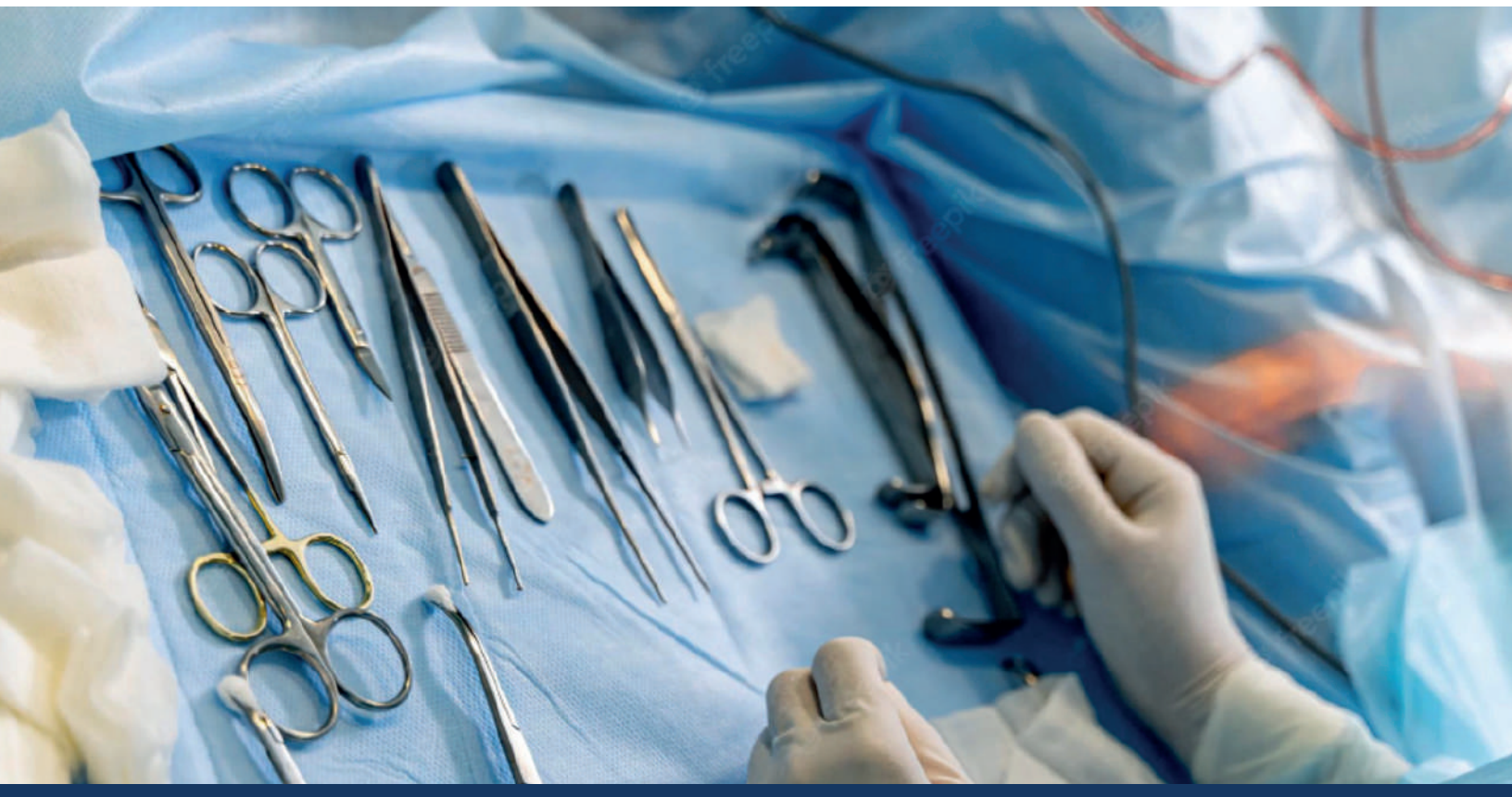

GARANTIA

Contamos con **garantías oficiales** de 6 meses.
que incluyen los siguientes servicios:

- + Asesoramiento para el uso.
- + Soporte técnico especializado.
- + Respuesta inmediata en caso de mal funcionamiento.



MD

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

Amilasa, lipasa, proteasa, carbohidrasa, agente de control de pH, conservantes, tensioactivo no iónico, estabilizadores, aditivos y agua.

ACTIVIDAD AMIOLÍTICA MÍNIMA:

0,02 ua.ml⁻¹.min.⁻¹;

ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA:

0,12 up.ml⁻¹.min.⁻¹.

CONTENIDO DE SURFACTANTE:

3,5%.

RANGO DE PH PURO:

5,8 a 7,0.

FECHA DE CADUCIDAD:

24 meses después de la fecha de fabricación.

VIDA ÚTIL EN CUBETA:

Hasta 14 días.

VIGENCIA:

24 meses.

ALMACENAMIENTO:

15 - 30 C

VIDA ÚTIL DE GALÓN ABIERTO:

75días.

EL SERVICIO INCLUYE

SERVICIO TÉCNICO

24 horas / 365 días

CAPACITACIONES PRESENCIALES U ONLINE

A acordar con el profesional.

GARANTÍA


6 meses

SOMOS UNA EMPRESA PERUANA

que busca importar y brindar la mejor tecnología a nuestras clínicas, hospitales y profesionales. Por ello disponemos de un alto nivel de compromiso para con el servicio de post-venta y emergencias de cualquiera de nuestros dispositivos.

AVALADO POR



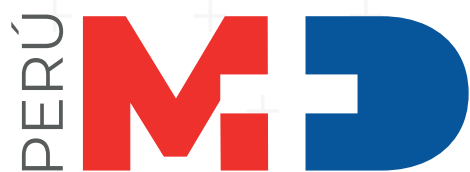

MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ ventas@mdperu.com

☎ +51 936 276 826

🌐 mdperu.com

☎ +51 1 4073376

📍 Av. El Ejército 1180. Edificio Time
Ofic. 1309 - Magdalena - Lima