



OPIDEX OPA

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL

Marca: Rioquímica

PERÚ **MD**

DES CRIP CIÓN

OPIDEX OPA es un desinfectante de alto nivel con excelente eficacia, seguridad y conveniencia. Está **diseñado para reprocesar dispositivos médicos semicríticos** sensibles al calor que no son aptos para la esterilización. Este desinfectante OPA es compatible y altamente reutilizable, tiene el tiempo de desinfección más rápido del mercado (5 minutos) a temperatura ambiente. Se puede utilizar manualmente o en un reprocesador de endoscopios automático (AER).

Ingrediente activo: Ortoftalaldehído (OPA) - 0.55%

Marca: **Riomédica.**
Procedencia: **Brasil.**



15 tiras
reactivas




EFICACIA COMPROBADA

Su principio activo tiene eficacia comprobada como fungicida, virucida, esporicida y bactericida (con más de 10 bacterias y más de 4 microbacterias).



COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Acero inoxidable, vidrio, teflón, silicona, plásticos, cloruro de polivinilo (PVC), caucho (los materiales se sumergen en solución OPIDEX OPA durante 168 horas a temperatura ambiente).

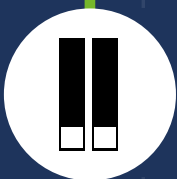

ALTA REUTILIZACIÓN

La solución OPIDEX OPA posee una ventana de acción de 14 días, lo que permite su reutilización siempre y cuando el test de monitoreo (tiras reactivas) indique una concentración adecuada. Se recomienda un máximo de 82 ciclos de uso.

FUNCIO- NAMIENTO

ACTIVIDAD MICROBICIDA:

Su gran espectro de actividad desinfectante logra eliminar los siguientes microorganismos:

Levaduras

- Candida albicans
- Candida tropicalis

Bacterias Ácidos resistentes

- Mycobacterium tuberculosis: H37Rv, H37Ra
- Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB)
- Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB)
- Mycobacterium avium
- Mycobacterium intracellulare
- Mycobacterium kansasii

Bacterias Gram positivas

- Staphylococcus aureus
- Enterococcus faecalis
- Enterococcus faecium

Enterobacterias

- E. coli
- Salmonella typhi
- Salmonella enteritidis
- Shigella sonnei
- Serratia marcescens
- Klebsiella pneumonia
- Enterobacter cloacae
- Citrobacter freundii

Proteus vulgaris

Bacilos no fermentados con glucosa

- Pseudomonas aeruginosa
- Acinetobacter baumannii
- Stenotrophomonas maltophilia

Bacterias resistentes a Antibióticos

- Vancomycin-resistant enterococcus (VRE)
- Methicillin-resistant S. aureus (MRSA)
- Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producing E. coli, etc.
- Bacillus subtilis



FUNCION- NAMIENTO

USO PREVISTO:

Utilícelo para la esterilización química y desinfección de herramientas médicas como:

- Herramientas contaminadas por microbios y materias orgánicas o que se emplean directamente para tejidos hipodérmicos y membranas mucosas.
- Herramientas que se espera contaminen con el virus de la hepatitis B tipo B
- Herramientas de operación quirúrgica: endoscopios.
- Herramientas integradas para lentes.
- Herramientas de anestesia.
- Herramientas de respiración artificial, desorden y catéter.
- Herramientas usadas en obstetricia y urología.
- Herramientas dentales o sus herramientas auxiliares.
- Jeringas, termómetros y herramientas de goma y/o plástico que no se pueden esterilizar térmicamente.

MODO DE USO:

Para una mejor desinfección, recomendamos el lavado previo de los dispositivos con un detergente para eliminar la materia orgánica que pueda contener.

PH NEUTRO

Su PH Neutro lo hace un desinfectante compatible con agentes de limpieza o detergentes enzimáticos con esta misma característica (pH suave).



RECOMENDACIÓN

Utilizar en espacios ventilados y con la indumentaria de seguridad.



DATO

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
Los **dispositivos no críticos** son aquellos que, aunque entran en contacto con la piel del paciente, no penetran hacia las membranas mucosas durante su utilización. Desinfectar dispositivos críticos como catéteres cardiacos, escalpelos o instrumentos quirúrgicos, generará un mayor riesgo de infecciones y quemaduras en los pacientes, ya que este tipo de dispositivos no requieren una desinfección, sino una esterilización.




FUNCIO- NAMIENTO

TIRA REACTIVA OPA

Las tiras reactivas de OPA son indicadores químicos para determinar si la concentración del producto, está por encima o por debajo de la concentración mínima efectiva establecida. Realice el procedimiento de prueba antes del uso del desinfectante



FAIL

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

FAIL




PASS



PASS

PASO A PASO

1. Sumerja toda la almohadilla indicadora de la tira reactiva en la solución durante veinte (20) segundos completos.
2. Retire la tira y toque el borde largo con una toalla de papel para eliminar el exceso de solución de OPA.
3. Coloque la tira, con la almohadilla hacia arriba, sobre una toalla de papel.
4. Espere 40 seg. adicionales y compare el color de la almohadilla indicadora con los indicadores de la izquierda.

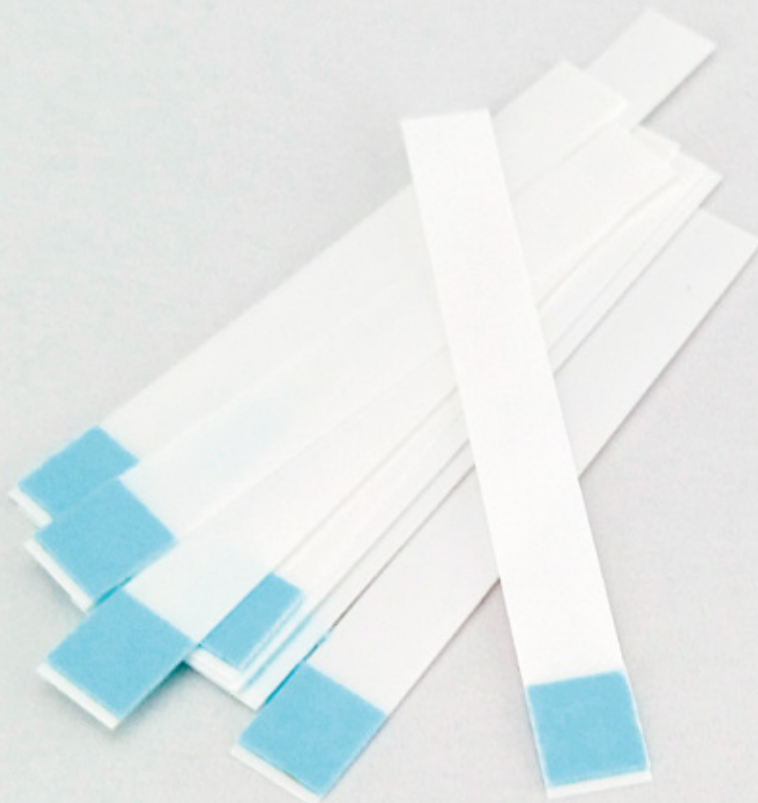

GARANTIA

Contamos con **garantías oficiales** de 6 meses.
que incluyen los siguientes servicios:

- + Asesoramiento para el uso.
- + Soporte técnico especializado.
- + Respuesta inmediata en caso de mal funcionamiento.



MD

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO:

Orto-ftalaldehído (OPA) - 0.55%

INGREDIENTES INERTES:

Hidrógeno fosfato de dipotasio, dihidrogeno fosfato de potasio, benzotriazol, hidrato de ácido cítrico, ácido N-(hidroxietil) etilendiaminotriacético (HEDTA), colorante verde número: 201, agua purificada Poliaxietileno(12-14) alquil éter, trietilenglicol.

USO DE VIDA:

Hasta 14 días.

DURACIÓN:

24 meses.

ALMACENAMIENTO:

15 ~ 30 °C

VIDA ÚTIL DEL GALÓN ABIERTO:

75 días

EL SERVICIO INCLUYE

SERVICIO TÉCNICO

24 horas / 365 días

CAPACITACIONES PRESENCIALES U ONLINE

A acordar con el profesional.

GARANTÍA

6 meses

SOMOS UNA EMPRESA PERUANA

que busca importar y brindar la mejor tecnología a nuestras clínicas, hospitales y profesionales. Por ello disponemos de un alto nivel de compromiso para con el servicio de post-venta y emergencias de cualquiera de nuestros dispositivos.



MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ ventas@mdperu.com

☎ +51 960 590 883

🌐 mdperu.com

☎ +51 1 500 8617

📍 Av. República de Panamá #3418

Ofic. 301 - San Isidro - Lima